

Beschreibung

Spezialschleifkörper aus Edelmetall, keramisch gebunden, für Oberflächenbearbeitung von Goldguss- und Edelmetall-Aufbrennlegierungen.

Anwendungsbereich

Ausgezeichnete Schleifwirkung für die Oberflächenbearbeitung von Brücken und Kronen. Für Goldguss- und Edelmetall Aufbrennlegierungen mit mehr als 50 % Goldgehalt.

Eigenschaften

- Edelmetall, keramisch gebunden
- Ausgezeichnete Schleifwirkung durch gezielte Brandführung bei der Herstellung der Steine
- Feinschnittiges Korn
- Weiter Drehzahlbereich (5000–12000 Upm)
- Runder Lauf dank präzise zentriertem Schaft (Ø 2.35 mm)
- Hohe Standfestigkeit bei gleichbleibender Struktur

Gebrauchsanleitung

Metalloberflächen mit leichtem Anpressdruck zwischen 5000–12000 Upm. in eine Richtung bearbeiten.

Besondere Risiken und Vorsichtsmassnahmen

Vermeiden Sie Staubartikel einzuatmen. Stets Abzugsanlage benutzen und Schutzbrille tragen.

Handelsform
Schachtel mit 12 Spezialschleifkörper
08052192 Cerasiv braun

Rx only