

I lavori di attivazione, disattivazione, riparazione e manutenzione periodica degli attacchi devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. Per questi lavori devono essere utilizzati esclusivamente i pezzi e gli strumenti ausiliari originali.

La pulizia meccanica degli attacchi con spazzolini e dentifricio può accelerare l'usura delle parti funzionali.

Con questa nuova direttiva d'utilizzazione vengono annullate automaticamente tutte le edizioni precedenti.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un non corretto utilizzo.

#### **Direttive generali delle coulissi**

##### **Preparazione del dente pilastro per coulissi extracoronali**

Esigenze particolari.

##### **Preparazione del dente pilastro per coulissi intracoronali**

Per migliorare l'estetica della corona protetica, la preparazione del moncone deve prevedere una cavità in cui viene collocata la femmina della culisse. Per le coulissi intracoronali a profilo omega è sufficiente una scanalatura. Gli assi della scanalatura e della cavità devono essere posizionati in funzione della collocazione futura dell'attacco. Per ottenere una buona sovrapposizione tra la femmina dell'attacco e la lega, è necessario che il diametro della scanalatura sia di 0.6 mm più largo rispetto alla femmina dell'attacco. Anche la distanza tra moncone e femmina metallica dev'essere di almeno 0.3 mm.

##### **Grandezza**

Qualora una coulisse sia disponibile in diverse grandezze consigliamo, se lo spazio lo permette, l'utilizzo della più grande.

##### **Lavori amovibili avvitati**

Se non si utilizza un attacco avvitato, il ponte può essere fissato con una vite posizionata nel braccio fresato. Per l'avvitamento su cappe radicolari vedere capitolo «Ancoraggi» nella documentazione Dental della Cendres+Métaux.

##### **Corone gemelle**

Nel caso in cui due corone siano unite in ogni quadrante laterale, si consiglia l'uso di attacchi articolati (vedere capitolo «Coulissi» nella documentazione Dental della Cendres+Métaux) per protesi in estensione uni- e bilaterali.

##### **Scheletrati**

Gli scheletrati (sbarra linguale, placca palatale, ecc.) delle protesi intercalate e in estensione uni e bilaterale devono essere assolutamente rigidi (senza effetto di elasticità).

##### **Bilanciamento trasversale**

Le protesi rigide unilaterale devono essere bilanciate trasversalmente. Consigliamo un attacco Cendres+Métaux (vedere capitolo «Coulissi» nella documentazione Dental della Cendres+Métaux).

##### **Scomposizione degli attacchi**

Prima di ogni trattamento termico (sovrapposizione, saldatura, tempera, cottura di ceramica) è necessario smontare l'attacco nei vari pezzi.

**Decapaggio**

Le parti femmine in Doral che si sono ossidate al momento della saldatura, possono essere decapate con acido solforico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) caldo diluito a 10% volumi.

**Avviso:** Per il decapaggio non devono essere usati acido nitrico (HNO<sub>3</sub>), acido cloridrico (HCl) e Neacid. Questi acidi possono intaccare la lega (Doral). Come alternativa si possono usare, con prudenza ed in via eccezionale, le perle lucidanti con una pressione di ca. 1.5 bar.

Le parti trattate con l'acido scoloriscono meglio se immerse per qualche istante nell'acqua saponata (con ultrasuono).

**Inserimento**

Dopo il trattamento termico è possibile che la frizione dell'attacco aumenti e quindi necessiti di un aggiustamento. Per ovviare a tale inconveniente usare della pasta di grafite applicandola soltanto su una parte della coulisse e asciugandola con aria compressa. Inserendo e disinserendo la femmina o il maschio si otterrà la frizione desiderata. Pulire con l'ultrasuono.

**Passo di vite**

Su richiesta possono essere fornite delle filiere e dei filettatori per attacchi con passo di vite specifico.

**Pezzi ausiliari per duplicare**

Questi pezzi in plastica rossa hanno una forma simile agli originali. La loro particolarità consiste in una grandezza leggermente maggiore.

**Disinfezione**

**Questi prodotti vengono forniti non sterilizzati.**

Prima di ogni prova o applicazione definitiva nel cavo orale la ricostruzione protesica dev'essere pulita e disinfettata.

**Ulteriori informazioni**

Le informazioni che riguardano la sopraffusione o la saldatura si trovano nella documentazione Dental della Cendres+Métaux o sulla pagina web [www.cmsa.ch/dental](http://www.cmsa.ch/dental).

**Allergie**

Nel caso di paziente allergico ad uno o più elementi di un materiale per attacchi, questo non deve essere usato.

È consigliabile sottoporre preventivamente il paziente che si suppone allergico ad uno o più elementi di un materiale per attacchi ad un test allergologico per verificare la tollerabilità al prodotto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro rappresentante Cendres+Métaux.

**Direttive per l'uso**

Le informazioni riguardanti i diversi attacchi ed il loro utilizzo figurano nella documentazione Dental della Cendres+Métaux. (Da richiedere in tutte le succursali, agenzie e rappresentanze della Cendres+Métaux)

**Importante: Questi attacchi sono elementi inseriti in un contesto di complementarità e necessitano di essere utilizzati unicamente con componenti o strumenti originali corrispondenti.**

**Diversamente il fabbricante declinerà ogni sua responsabilità. In caso di contestazioni deve essere sempre indicato il numero di lotto.**

**Etichettatura della confezione / Simboli**

Fabbricante



Numero di catalogo



Codice del lotto



Quantità



Vedere le istruzioni per l'uso

Rx only

Attenzione: le leggi federali USA limitano la vendita di questo dispositivo a medici autorizzati o su loro prescrizione



I prodotti Cendres+Métaux marcati CE soddisfano i corrispondenti requisiti delle direttive europee.



Non riutilizzare



Non sterile



Conservare al riparo dalla luce solare



Attenzione, consultare i documenti accompagnatori