




+ Dalbo® Abutment.
De l'original au système.

 **CENDRES⁺
MÉTAUX**
Medtech

prosthetic.line

Le système d'origine par Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux étend continuellement sa gamme de systèmes pour prothèses amovibles sur implants. Avec le lancement du pilier à boule Dalbo®, Cendres+Métaux renforce l'accès direct et complet au célèbre système Dalbo® aux performances cliniques remarquables. Son principe de fonctionnement est appliqué depuis plus de 40 ans et son efficacité est cliniquement prouvée par des millions de cas.

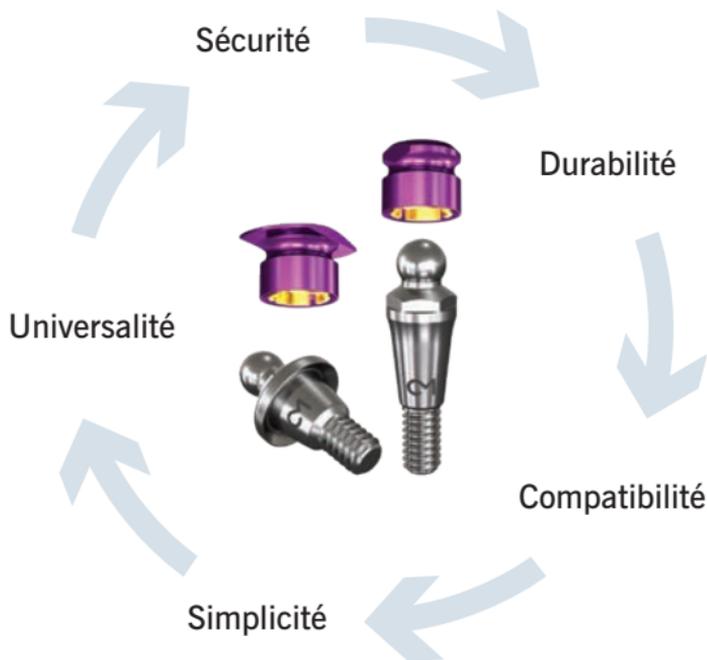

Vos avantages.

Fiabilité et stabilité

La forme sphérique et compacte est hautement résistante. Le modèle spécial et l'association avec des inserts en métal précieux Elitor® garantissent un fonctionnement fiable et stable.

Simplicité

Le système Dalbo® est facile à mettre en œuvre au cabinet et au laboratoire. Il nécessite peu de maintenance.

Usage universel

Les composants du système ont été optimisés pour l'application correspondante.

Compatibilité

Toutes les parties femelles sont ajustées aux parties mâles sphériques d'autres fabricants conçues avec un diamètre de 2,25 mm.


Réglage de la force de rétention.

Le Dalbo®-PLUS offre la particularité d'un réglage individuel de la force de rétention selon la situation buccale et les besoins du patient. Pour chaque $\frac{1}{4}$ de tour, la force de rétention augmente progressivement d'environ 200 g.

En cas de besoin ou lors d'usure de la partie sphérique, la pièce à lamelles de rétention peut être échangée par une des pièces à lamelles «Tuning». Ce remplacement s'effectue sans démontage de la partie femelle.

Le niveau d'activation le plus élevé est obtenu après un tour et demi au maximum (max. 2 200 g).

Force de rétention en relation avec l'activation

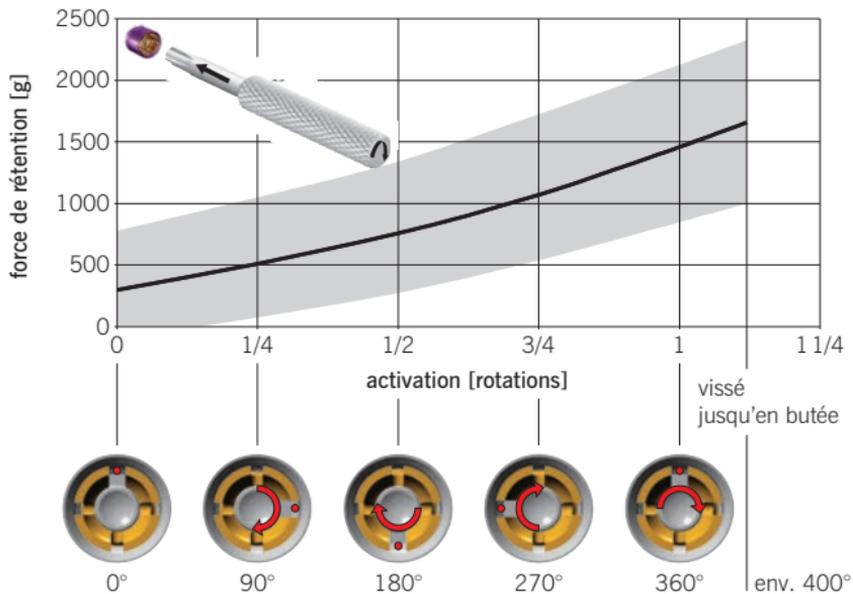

La gamme.

N° comm.	Description	Contenu
voir web	 Dalbo® Abutment	1 p. NEW
05002599	 Dalbo® CAD/CAM élément de rétention élément de rétention pour barre	1 p. NEW
055752	 Partie femelle TE basic complète	1 p.
055890	 Partie femelle TE elliptic complète	1 p.
055643	 Pièce avec lamelles rétentives E	1 p.
05000068	 Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» soft E	1 p.
055687	 Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» E	1 p.
050394	 Rondelle d'espacement Z	5 p.
072626	 Pièce de doublage / pièce auxiliaire G	1 p.
070157	 Axe de transfert	1 p.
07000312	 Dalbo® Abutment Analogue	4 p. NEW

N° comm.	Description	Contenu
0700 0266	Dalbo® Abutment Tournevis	1 p.
		NEW
072 609	Tournevis / activateur	1 p.
		
072 639	Tige d'extraction à chaud	1 p.
		
0700 0026	Set de jauges : Comprend : Jauge partie mâle (0700 0027) Jauge partie femelle (0700 0024) Pièce avec lamelles rétentives (055 643) Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» soft (0500 0068) Pièce avec lamelles rétentives «Tuning» (055 687) Tournevis / activateur (072 609)	1 p.
		
0700 0269	Clé dynamométrique avec adaptateur	1 p.
		NEW
0700 0268	Adaptateur pour clé dynamométrique	1 p.
		NEW

Disponibilité.

Les piliers d'implants Dalbo® sont disponibles pour les principaux systèmes du marché, notamment:

- Straumann®
- Astra Tech®
- Nobel Biocare®
- DENTSPLY Ankylos®
- Camlog®
- Osstem®



Liste des compatibilités disponible en ligne :
www.cmsa.ch/Dental/Download-Center

Les produits marqués du symbole ® sont des marques déposées de leur propriétaire respectif.