




+ Dalbo® Abutment.

Dall'originale al sistema.

Il sistema di origine Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux amplia continuamente la propria gamma di sistemi protesici su impianti. Lanciando l'abutment Dalbo[®], Cendres+Métaux consente un accesso diretto e completo al noto sistema Dalbo[®] clinicamente comprovato. Il principio funzionale in uso da oltre 40 anni ha dimostrato la sua efficacia in milioni di casi clinici.

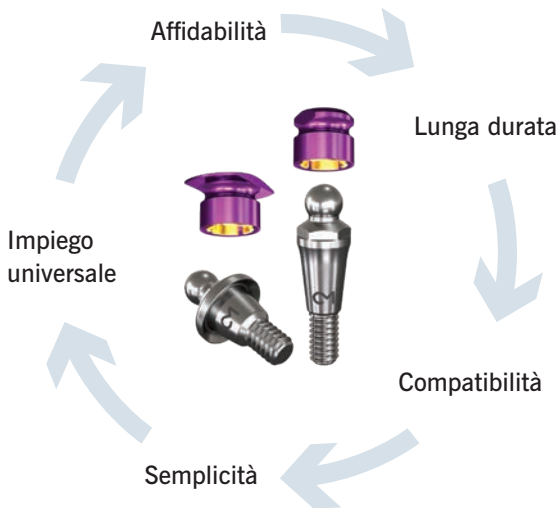

Vantaggi per l'operatore.

Affidabilità e lunga durata

La forma sferica compatta è estremamente resistente. La struttura speciale e la combinazione con inserti in metallo prezioso Elitor® assicurano una funzione sicura e duratura.

Semplicità

Il sistema Dalbo® è facile da usare sia per lo studio odontoiatrico che il laboratorio odontotecnico e richiede minima manutenzione.

Impiego universale

I componenti del sistema sono stati ottimizzati per la rispettiva applicazione.

Compatibilità

Tutti gli elementi femmina si adattano perfettamente agli elementi sferici maschio di altri produttori di ancoraggi sferici con diametro di 2,25 mm.


Impostazione della forza di ritenzione.

Il Dalbo®-PLUS può essere perfettamente impostato sulla situazione individuale del paziente con un metodo esclusivo. Ad ogni $\frac{1}{4}$ di giro, la forza di ritenzione ad incremento progressivo aumenta di circa 200g.

Se necessario, l'inserto ritentivo a lamelle può essere sostituito senza smontare la femmina oppure, in presenza di stato di usura avanzata delle sfere, è possibile sostituirlo con gli inserti ritentivi a lamelle di «Tuning».



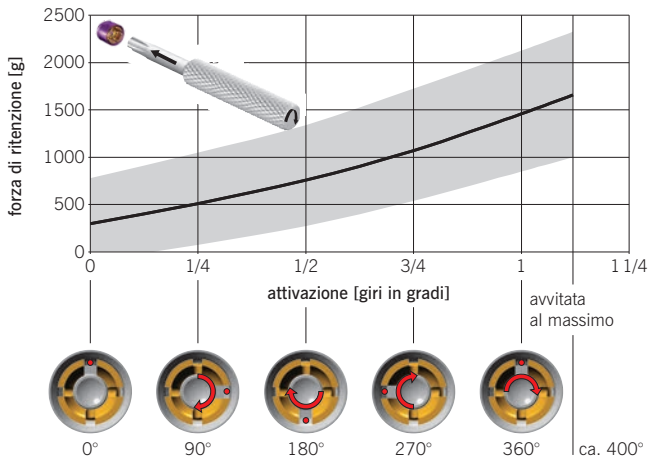

Il massimo livello di attivazione viene raggiunto dopo max. un giro e mezzo (max. 2.200g).

Ritenzione in relazione all'attivazione



Assortimento.

Codice		Descrizione	Contenuto
vedi Web		Dalbo® Abutment	1 p. NEW
05002599		Dalbo® CAD/CAM elemento ritentivo elemento ritentivo per barra	1 p. NEW
055752		Femmina TE basic completa	1 p.
055890		Femmina TE elliptic completa	1 p.
055643		Ghiera ritentiva a lamelle E	1 p.
0500068		Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» soft E	1 p.
055687		Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» E	1 p.
050394		Distanziatore Z	5 p.
072626		Pezzo per duplicare / mantentore di spazio G	1 p.
070157		Asse di trasferimento	1 p.
07000312		Dalbo® Abutment Analog	4 p. NEW

Codice	Descrizione	Contenuto
0700 0266	Dalbo® Abutment Cacciavite	1 p.
		NEW
072 609	Cacciavite / attivatore	1 p.
		
072 639	Estrattore termico	1 p.
		
0700 0026	Kit di calibri	1 p.
	<p>Confezione contenente:</p> <p>Calibro per maschio (0700 0027)</p> <p>Calibro per femmina (0700 0024)</p> <p>Ghiera ritentiva a lamelle (055 643)</p> <p>Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» soft (0500 0068)</p> <p>Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» (055 687)</p> <p>Cacciavite / attivatore (072 609)</p>	
0700 0269	Chiave dinamometrica con adattatore	1 p.
		NEW
0700 0268	Adattatore per chiave dinamometrica	1 p.
		NEW

Disponibilità.

Gli abutment Dalbo® sono disponibili per tutti i principali sistemi implantari, quali:

- Straumann®
- Astra Tech®
- Nobel Biocare®
- DENTSPLY Ankylos®
- Camlog®
- Osstem®



Elenco compatibilità disponibile online:
www.cmsa.ch/Dental/Download-Center

I prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati dei rispettivi fabbricanti.