

Mode d'emploi

Description

Sel désoxydant.

Application

Pour fonte à la flamme ou à induction des alliages céramo-métalliques (solidus supérieure à 1000°C).

Mode d'emploi

Saupoudrer en petite dose l'acide borique sur les plots/masselottes avant de fondre l'alliage. Acide borique évite une forte oxydation durant la fonte d'alliage. Acide borique peut également être utilisé ainsi pour faire le glaçage à l'intérieur du creuset.

Conseil de prudence

T



Toxique

Contient: Acide borique

R60 Peut altérer la fertilité.

R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

S53 Éviter l'exposition – se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Conditionnement
08052176 Acide borique 80 ml



Rx only