

Istruzioni d'uso

Descrizione

Sale disossidante

Applicazione

Per fusione alla fiamma (con crogiolo refrattari) di leghe ceramo-metalliche preziose (solido superiore a 1000°C).

Modo d'uso

Aggiungere una piccola quantità di acido borico alla lega prima di procedere alla fusione. L'acido borico evita una forte ossidazione delle leghe durante la fusione. L'acido borico viene inoltre utilizzato per la vetrinatura di chamotte o ceramica.

Consigli di prudenza

T



Tossico

Contiene: Acido borico

- R60 Può ridurre la fertilità.
- R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.
- S53 Evitare l'esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
- S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Disponibilità
08052176 Acido borico 80ml



Rx only