

Ácido bórico

Instrucciones de uso

1 / 1
12.2010

Descripción

Sal desoxidante.

Aplicación

Para fundición a la llama o por inducción de aleaciones convencionales (punto sólido superior a 1000°C).

Modo de empleo

Espolvorear en pequeñas cantidades el Ácido bórico sobre las planchitas/restos antes de fundir la aleación. El Ácido bórico evita la oxidación durante el fundido de la aleación. El Ácido bórico también puede ser usado para el glaseado interior de los crisoles.

Precauciones aconsejables

T



Tóxico

Contiene: Ácido bórico

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

S53 Evítese la exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Presentación
08052176 Ácido bórico 80ml



Rx only