

## Istruzioni d'uso

### Descrizione

Sale disossidante

### Applicazione

Per fusione alla fiamma (con crogiolo refrattari) delle leghe convenzionali (solido inferiore a 1000°C).

### Modo d'uso

Aggiungere una piccola quantità di acido borico alla lega prima di procedere alla fusione. L'acido borico evita una forte ossidazione delle leghe durante la fusione. L'acido borico viene inoltre utilizzato per la vetrinatura di chamotte o ceramica.

### Consigli di prudenza

T



**Tossico**

**Contiene: Borace**

**R60** Può ridurre la fertilità.

**R61** Può danneggiare i bambini non ancora nati.

**S53** Evitare l'esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

**S45** In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Disponibilità  
080232 Borax 100 ml



Rx only