

Descripción

Puntas montadas abrasivas para desbastar y reparar superficies de aleaciones ceramo-metalicas a base de paladio y aleaciones no preciosas.

Utilización

Para desbastar y reparar armaduras ceramo-metalicas, de bajo contenido en oro o a base de paladio.

Características

- Oxido de aluminio puro (Al_2O_3)
- No deja ningun residuo que sea perjudicial, como el carbono
- Granulos finos y de tamaño regular
- Elección mas amplia en cuanto a la velocidad de la pieza de mano (de 5000 a 12000 t/min.)
- Movimiento de rotación preciso gracias al perfecto centrado del mandril (\varnothing 2,35mm)
- Buena resistencia al uso, mantiene una estructura constante y una abrasion regular.

Modo de empleo

Para el desbastado (raspado) de los elementos, aplicar una ligera presión sobre las superficies del metal imprimiendo movimientos en una sola dirección (de 5000 a 12000 t/min.).

Consejos de prudencia

Evite de respirar el polvo, trabaje en un lugar bien ventilado, use lentes de protección.

Presentación
caja 12 puntas
08052193 Cerasiv azul

Rx only