

Description

Pointes montées abrasives pour le dégrossissage de surfaces des alliages céramo-métalliques à base palladium et alliages non précieux.

Utilisation

Pour dégrossissage et surfaçage d'armature céramo-métallique, à teneur réduite en or ou base de Palladium.

Caractéristiques

- Oxyde d'aluminium pur (Al_2O_3)
- Ne laisse subsister aucun résidu préjudiciable, tel que le carbone
- Granulation pour une taille fine
- Choix plus large en ce qui concerne le nombre de tours (de 5000 à 12000 tours/min.)
- Mouvement de rotation précis grâce au parfait centrage du mandrin (\varnothing 2,35 mm)
- Bonne résistance à l'usure de par la structure constante et une abrasion régulière

Mode d'emploi

Pour le dégrossissage (grattage) des éléments, exercer une légère pression sur les surfaces du métal des éléments en imprimant des mouvements dans une seule direction (de 5000 à 12000 tours/min.).

Conseils de prudence

Éviter de respirer les poussières, utiliser une hotte d'aspiration et des lunettes de protection.

Conditionnement
boîtes de 12 pointes
08052193 Cerasiv bleu

Rx only