

Descripción

Puntas montadas abrasivas para desbastar las superficies de las aleaciones ceramo-metalicas preciosas.

Utilización

Para desbastar y repasar puentes y coronas de aleaciones preciosas convencionales o ceramo-metalicas, cuyo contenido en oro es superior a 50%.

Características

- Corindón fino con aglutinante cerámico
- Abrasion eficaz gracias a los tratamientos específicos de cocción en curso de fabricación.
- Granulos finos y de tamaño regular
- Elección mas amplia en cuanto a la velocidad de la pieza de mano (de 5000 a 12000 t/min.)
- Movimiento de rotación preciso gracias al perfecto centrado del mandril (\varnothing 2,35mm)
- Buena resistencia al uso, mantiene una estructura constante y una abrasion regular.

Modo de empleo

Para el desbastado (raspado) de los elementos, aplicar una ligera presión sobre las superficies del metal imprimiendo movimientos en una sola dirección (de 5000 a 12000 t/min.).

Consejos de prudencia

Evite de respirar el polvo, trabaje en un lugar bien ventilado, use lentes de protección.

Presentación
caja 12 puntas
08052192 Cerasiv marron

Rx only