

Description & Utilisation

Legabril Diamond est une pâte à polir contenant de fines particules diamantées pour le polissage de tous les alliages dentaires et particulièrement pour les alliages auro-céramiques jaunes difficiles à polir.

Avantages pour le laboratoire dentaire

1. Un polissage principal parfait, sans risque d'altération de la surface métallique.
2. Une granulométrie optimale des particules diamantées, permettant un travail plus rapide, donc un gain de temps.
3. Legabril Diamond est onctueux, l'application est plus facile sur les surfaces du métal ou sur les brosses.
4. Peut être utilisée avec des brosses, des feutres, des tampons de cuir et de coton.
5. Est composée d'un liant organique et de substances minérales, sans préjudice pour l'utilisateur et l'environnement.
6. Peut être utilisée également pour les travaux en résine et en céramique.

Mode d'emploi

Préparation des surfaces métalliques:

Préparer soigneusement les surfaces et les parties occlusales avec des instruments rotatifs (gomme, fraise pointue, etc.). La préparation pour un poli-brillant final parfait est obtenue à l'aide d'un microscope.

Prépolissage:

Appliquer une pâte de pré-polissage sur des brosses de dureté différentes selon le type d'alliage à polir. Travailler de 5000 à 11000t/min. avec une petite pression en imprimant des mouvements rotatifs.

Polissage principal:

Prélever une faible quantité de Legabril Diamond sur les brosses. Commencer à partir de 5000 à 7000t/min. en exerçant une petite pression sur les surfaces du métal à polir avec des mouvements rotatifs jusqu'à ce que la brillance apparaisse.

Polissage brillant:

Pour réaliser avec Legabril Diamond un poli-brillant final impeccable, utiliser des tampons de cuir ou de coton et polir les surfaces de 5000 à 11000t/min.

Conseils de prudence

Eviter de respirer les poussières, utiliser une hotte d'aspiration et des lunettes de protection.

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Xn



nocif

Contient: distillat de pétrole

R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R65-66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Conditionnement

08052307 Legabril Diamond, pot de 50g,



Rx only