

**Descrizione**

Decappante in pasta e saldatura per saldatura di leghe non-preziosa o saldature mista.

**Applicazione**

Saldature di elementi non preziosi. Estensione di scheltrati, posa di ritenzioni ecc. Saldatura mista, per es. saldatura di attacchi oro o acciaio, elementi secondari fresati su scheletrati. Saldatura di fusioni di raccordo in metallo su scheletrati. Lavori ortodontici.

**Nota**

La saldatura Solchrom non è indicata per la saldatura con puntatrice elettrica.

Per questa tecnica consigliamo di utilizzare la saldatura (acciaio) 800.

Importante Durante la saldatura mista oro/acciaio, occorrerà rispettare il solidus della lega preziosa, che dovrà essere almeno 980°C. Nel caso in cui il solidus della lega è troppo basso, procedere in due tempi:

- Stagnatura dello scheletrato con Solchrom
- Mettere in rivestimento e saldare con una saldatura aurea compatibile con la lega preziosa.

**Modo d'uso**

1. Preparare accuratamente le superfici da saldare che dovranno essere prive di ossido o di residui di cera.
2. Evitare di assemblare i pezzi con cera collante.
3. Realizzare un blocco di saldatura in modo di assicurarne la stabilità (Solvest MP) e di permettere una buona diffusione del calore. Le zone da saldare saranno libere da rivestimento. Lasciare indurire il blocco per 15 minuti.
4. Eliminare la cera con acqua bollente. Sgrassare, se necessario, con cotone imbevuto di benzina.
5. Applicare con uno strumento un poco di Solflux sulle superfici da saldare prima di ogni azione termica sul lavoro.
6. Per la saldatura utilizzare un cannello propano-ossigeno (per ex.: Météor MP – con lancia L oppure Météor Micro con gli aghi per lavori molto fini).
7. Gli elementi saranno preriscaldati solo col cannello, mai nel forno.
8. Con un preriscaldamento ideale Solflux si spande formando uno strato rosso chiaro uniforme sulla superficie da saldare. Non rimane che applicare la saldatura Solchrom precedentemente immersa nel Solflux.
9. Dopo la saldatura, immergere per qualche minuto il lavoro in acqua tiepida per facilitare la dissoluzione del Solflux.
10. Terminare e lucidare seguendo il metodo abituale.

**Consigli di prudenza**

Non respirare il fumi.

R22 Nocivo per ingestione.

R38 Irritante per la pelle.

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

**Contiene:**

**Acido boricco, composti di potassio, bifluoruro de potasio**

R25 Tossico per ingestione.

R34 Provoca ustioni.

R38 Irritante per la pelle.

R60 Può ridurre la fertilità.

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.

S23 Non respirare i aerosoli.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

S53 Evitare l'esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

Disponibilità  
08051182 Solflux, 7g



Rx only