

## Beschreibung

Anti-Flux Paste auf Zirkonium-Oxid-Basis.

## Anwendungsbereich

Stopor gestattet auf einfachste Weise eine einwandfreie Begrenzung des Lotflusses und verhindert mit Sicherheit jegliches Vordringen von Lot an unerwünschte Stellen, z.B. Geschiebematrizen oder Okklusalfächen. Elemente in konventioneller Legierung können relativ stark oxidieren. Eine Verfärbung von metallkeramischen Arbeiten wäre eventuell denkbar. Stopor kann diese Gefahr wirksam begegnen. Stopor kann mit der offenen Flamme sowie im Keramikofen angewendet werden.

## Gebrauchsanleitung

Eine dünne Schicht wird mit einem Pinsel oder Instrument auf die zu lötenden Elemente aufgetragen, mit Ausnahme der Lotstelle. Kurz trocknen lassen und mit Lötvorgang beginnen.

Handelsform  
08052181 Stopor Dose zu 10g

Rx only