

# Soprano® Surface 사용 설명서

- 1 사용 설명서 적용 범위**  
본 사용 설명서는 항목 29의 표 1 내 기재된 제품에 적용됩니다. 본 사용 설명서의 출간으로 이전에 발간된 모든 버전은 유효성을 상실합니다. 본 사용 설명서를 유의하지 않아 발생하는 손상에 대해 제조사는 모든 책임을 거부합니다.
- 2 상표명**  
항목 29, 표 1 참조.
- 3 규정에 맞는 사용**  
이 구성 요소는 보철 치아 수복물 및 치과 병원 또는 기공소 내 처리 지원에 사용됩니다.
- 4 임상적 예상 이점**  
저작 기능 회복 및 심미성 개선.
- 5 제품 설명**  
Soprano® Surface는 안료가 포함된 바로 사용할 수 있는 반투명, 유백색 및 형광성 페이스트 형태의 유리 세라믹입니다. 이 제품은 산화지르코늄, 리튬 디실리케이트 및 외장 세라믹 수복물의 구조화 및 개별화에 사용됩니다.  
DIN EN ISO 6872에 따른 분류; 타입 1, 등급 1
- 6 적용중**  
다음과 같은 프레임 소재에서 사용:  
- 열팽창이 약  $10.6 \times 10^{-6} \times K^{-1}(25 - 500^{\circ}C)$ 인 안정화된 4각형 산화지르코늄(Y-TZP) 재질의 완전히 해부학적으로 제작된 크라운 및 브리지.  
- 열팽창이 약  $10.6 \times 10^{-6} \times K^{-1}(25 - 500^{\circ}C)$ 인 안정화된 4각형 산화지르코늄(Y-TZP) 재질의 크라운 및 브리지, 산화지르코늄 세라믹으로 외장(예: Soprano® 10).  
- 열팽창이 약  $10.0 \times 10^{-6} \times K^{-1}(25 - 500^{\circ}C)$ 인 모놀리식 리튬 디실리케이트 유리 세라믹(예: Livento® press).  
- 열팽창이 약  $10.0 \times 10^{-6} \times K^{-1}(25 - 500^{\circ}C)$ 인 리튬 디실리케이트 유리 세라믹(예: Livento® press), Soprano® 10으로 외장.  
- 금속 세라믹 수복물, 예를 들어 Soprano® 14로 외장.
- 7 금기**  
- 표시되지 않은 프레임 재료 외장  
- 다른 세라믹과 혼합(분말, 페이스트)  
- 다른 세라믹 삽입(분말, 페이스트)  
- 다른 액체 사용  
- 환자가 올바른 후속 처치/추후 진료 지침을 따르려는 마음이 없는 경우.  
- 환자에게 알치증 또는 기타 이상 기능 습관이 있는 경우.  
- 환자가 제품에 사용된 재료 중 하나 이상의 요소에 대한 기존 알레르기가 있는 경우.  
- 환자의 기존 구강 상태로 인해 제품의 올바른 사용이 불가능합니다.
- 8 호환 제품**  
사용 불가능.
- 9 사용자 자격 사항**  
전문적인 치과 의사 및 치과 기공사의 지식이 필요합니다. 최신 사용 설명서를 항상 이용할 수 있어야 하며 첫 사용 전 완전히 읽고 이해해야 합니다. 반드시 자격을 갖춘 전문 인력이 제조 및 해당 정비를 담당해야 합니다.
-  전문가에게 중요한 정보
-  더 큰 주의를 알리는 경고 기호
- 10 규정**  
연방법(USA)에서는 면허가 없는 치과 의사에 의한 사용 또는 판매를 금지합니다.
- 11 부작용**  
 환자가 제품 재료 중 하나 이상의 요소에 대해 기존 알레르기가 있는 경우 이 제품을 사용하면 안 됩니다. 환자에게 재료 중 하나 이상의 요소에 대해 알레르기 의심 소견이 있는 경우 사전에 알레르기 여부를 확인하고 알레르기가 없음을 증명한 후에만 이 제품을 사용할 수 있습니다.  
철제 제품 및 보조기구는 니켈을 포함할 수 있습니다.  
올바르게 사용하는 경우 알려진 부작용은 없습니다.
- 12 경고 지침**  
 자기 공명 환경  
제품은 MR 환경에서 안전 및 호환성이 평가되지 않았습니다.  
제품은 MR 환경에서 가열 및 마이그레이션에 대해 테스트되지 않았습니다.
- 13 일반 지침**  
이 사용 설명서는 사용 설명서의 적용 범위에 설명되어 있는 제품에 즉시 적용하기에 충분합니다. 치의학 지식 또는 치기공 지식이 필요합니다.  
정보: [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)
- 14 예방 조치**  
 - 칫솔 및 치약을 사용한 기계적 세척은 조기 마모로 이어질 수 있습니다.  
- 연삭 시 분진 마스크와 보안경을 착용하고 흡입 장치와 함께 작업하십시오.  
- 이 작업에는 정품 보조 도구 및 부품만 사용해야 합니다. 안내와 추가 정보는 귀하의 Cendres+Métaux SA 대리점에 문의하십시오.  
- 제품 구성 요소는 비멸균 상태로 인도됩니다. 자세한 정보는 항목 16 처리를 참조하십시오.  
- 부품이 흡입되지 않도록 안전하게 조치하십시오.  
- 매 수술 전 필요한 모든 제품 구성 요소의 수량이 충분히 있는지 확인하십시오.  
- 자신의 안전을 위해 항상 적합한 보호복을 착용하십시오.

**15 일회용**

달리 표시가 없는 한 제품 구성 요소는 일회용입니다. 일회용(single-use)으로 표시된 제품은 삽입 도중 마모, 기능 손실 및/또는 오작동으로 이어질 수 있는 일정한 부하를 받습니다.

- ⚠ 일회용(single-use) 제품으로 표시된 제품을 재사용할 경우 안전, 기능 및 성능이 저해될 수 있습니다. 일회용(single-use) 제품은 재사용/재처리와 관련하여 테스트되지 않았으며 감염 전파 위험이 높습니다.

**16 처리**

- 📖 매번 마무리 또는 변경 후에 그리고 사용 전에 모든 시스템 구성 요소를 포함하여 보철 작업을 세척, 소독, 및 경우에 따라 멸균해야 합니다. Pekkton® 외의 다른 플라스틱 재료 구성 요소는 적합하지 않은 반면 금속 레진, 고성능 중합체(Pekkton®) 및 세라믹 재료는 증기 멸균에 적합합니다. 소독 및 멸균 공정 선택 시 국가별 공시 가이드라인 및 «외과 및 보철 제품 처리» 사용 설명서에 유의하십시오(www.cmsa.ch/docs).

**17 적용 범위**

- 📖 Soprano® Surface 세라믹의 가공은 이미 알려지고 정립된 치과용 세라믹 기구 및 가공 기구, 믹싱 플레이트, 오븐 및 액세서리를 갖춘 치과 기공소에서 실시됩니다. Soprano® Surface 사용을 위해 새로운 제품별 기구가 필요하지 않습니다.

**18 시술 절차**

**18.1 세라믹 색상 및 세라믹 페이스트 설명:**

- Flu-Shade;** A, B, C, D 색상의 착색을 위한 Body 페이스트.
- Flu-Stain;** 개별적이고 특징적인 착색을 위한 효과 페이스트.
- Surface Base, Mamelon, Fossa 및 Cuspid;** 개별적인 특성 삽입.
- Surface Enamel Effect;** 절단 영역에서 개별적인 투명 효과 강조.
- Surface Enamel V;** 밝기가 점진적인 중성 페이스트. 개별적인 특징을 삽입하고 치아 색상을 밝게 합니다. V1의 밝기가 가장 높고 V3의 밝기가 가장 낮습니다.
- Surface Enamel Opal, Incisal 및 Clear;** 절단 영역에서 사용.
- Surface Gingiva;** 잇몸의 자연스러운 디자인을 위해 서로 조화된 페이스트 및 색상.

**18.2 세라믹 페이스트 관련 지침**

- 📖 - Soprano® Surface 및 Soprano® Stain & Shade 페이스트가 물과 접촉하면 안 됩니다.
- 브러시 또는 주걱이 건조한 상태여야 합니다.
- Soprano® Surface 및 Soprano® Stain & Shade 사용 전에 항상 페이스트를 금속이 없는 주걱으로 잘 혼합하십시오.
- Soprano® Surface 페이스트의 원하는 일관성을 위해 Soprano® Surface Fluid만 사용하십시오.
- Soprano® Stain & Shade 페이스트의 원하는 일관성을 위해 Soprano® Glaze Fluid만 사용하십시오.
- 페이스트를 도포하기 전에 Soprano® Surface Fluid 또는 Soprano® Glaze Fluid로 브러시를 적시십시오.

**18.3 프레임 가공**

- 프레임 소재 제조사의 설명에 따라 프레임 준비.
- 날카로운 모서리와 가장자리는 반드시 피하십시오.
- 첫 사용 전에 산화알루미늄(2bar 압력에서 110µm)으로 조심스럽게 샌드 블라스팅하여 Soprano® Surface 및 Soprano® Stain & Shade 페이스트로 표면을 준비하십시오.
- 매번 사용 전에 스팀 클리너로 표면을 올바르게 청소한 후 건조시키십시오.

**18.4 구조화**

- 📖 소성 당 Soprano® Surface의 층 두께는 0.1에서 최대 0.3mm입니다.
- Soprano® Surface 페이스트를 처음 사용하기 전에 Soprano® Surface Fluid로 표면을 적시십시오.

**18.5 착색**

Soprano® Stain & Shade 페이스트를 처음 사용하기 전에 Soprano® Glaze Fluid로 표면을 적시십시오.

**18.6 글레이즈 페이스트 도포**

표면을 연마한 후 Soprano® Glaze Fluid를 전체 수복물에 얇고 균일하게 도포하십시오.

**18.7 마무리**

광택도는 유약 소성 후 연마 도구와 다이아몬드 연마 페이스트로 개별적으로 조정할 수 있습니다.

**18.8 연소표**

**Soprano® Surface 및 Soprano® Stain & Glaze 페이스트용 연소표**

리튬 디실리케이트(Livento® press)에 모듈리식 또는 외장됨.  
산화지르코늄용 외장 세라믹(Soprano® 10).

시작 온도 °C	사전 건조 분	차단 시간 분	온도 상승 K/분	진공 시작 °C	진공 종료 °C	연소 온도 °C	유지 시간 분
400	3	4	45	670	720	720	2

**Soprano® Surface 및 Soprano® Stain & Glaze 페이스트용 연소표**

모듈리식 산화지르코늄용.  
금속 합금용 외장 세라믹(Soprano® 14).

시작 온도 °C	사전 건조 분	차단 시간 분	온도 상승 K/분	진공 시작 °C	진공 종료 °C	연소 온도 °C	유지 시간 분
400	3	4	45	670	770	770	1

- 📖 3g 이상의 부피가 큰 산화지르코늄 작업의 경우 제조사 설명에 따라 장시간 냉각이 필요합니다.
- 부피가 큰 수복물의 경우 소성 후 개방 시간 2분이 경과한 다음 가마를 여십시오!
- 다중 소성의 경우 원하는 광택도에 따라 최종 온도를 10-20°C 낮출 수 있습니다!
- 연소 온도에 관한 내용은 기준값이고 사용된 연소 가마 유형과 장치의 노후화에 따라 다를 수 있습니다.

## 19 소재

모든 Soprano® Surface 및 Soprano® Stain & Shade 페이스트는 치과 세라믹에 적용되는 규격(DIN EN ISO 6872, ISO 10993)을 충족합니다. 모든 한계값에 미달되고 임계값은 초과됩니다.

### 19.1 Soprano® Surface

DIN EN ISO 6872 / ISO 10993-5에 따른 물리화학적 특성

특성	사양	측정값
열팽창 계수 (25 – 475°C) [ $\times 10^{-6} \times K^{-1} \pm 0.5$ ]	2 x: 9.5 4 x: 9.5	2 x: 9.5 4 x: 9.5
유리 형질전환 온도 T <sub>g</sub> [°C ± 20]	2 x: 495 4 x: 495	2 x: 495 4 x: 495
굴절 강도 [MPa]	≥ 50	130 – 150
용해성 [µg/cm <sup>2</sup> ]	< 100	19 – 35
방사능 [Bq·g <sup>-1</sup> U <sup>238</sup> ]	< 1	해당 정보*
세포 독성	세포 독성 없음	해당 정보**

\*) 관련 보고서 170231-20-A, 17-02-01, mds, D-Gilching

\*\*) 관련 분석 보고서 17-10238, 17-01-20, FZ Jülich, D-Jülich

### 19.2 Soprano® Shade and Stain

DIN EN ISO 6872 / ISO 10993-5에 따른 물리화학적 특성

특성	사양	측정값
열팽창 계수 (25 – 475°C) [ $\times 10^{-6} \times K^{-1} \pm 0.5$ ]	2 x: 10.0 4 x: 10.0	2 x: 9.8* 4 x: 9.8*
유리 형질전환 온도 T <sub>g</sub> [°C ± 20]	2 x: 460 4 x: 460	2 x: 455* 4 x: 455*
굴절 강도 [MPa]	≥ 50	> 130*
용해성 [µg/cm <sup>2</sup> ]	< 100	해당 정보*
방사능 [Bq·g <sup>-1</sup> U <sup>238</sup> ]	< 1	해당 정보**
세포 독성	세포 독성 없음	해당 정보***

\*) 기본 질량의 측정값(베이스)

\*\*) 관련 분석 보고서 17-10237, 17-01-20, FZ Jülich, D-Jülich

\*\*) 관련 보고서 170231-20-C, 17-02-01, mds, D-Gilching

재료 및 그 할당에 대한 자세한 정보는 특수 재료 데이터 시트, 카탈로그 및 항목 29의 표 1에 기재된 제품 목록에서 참조할 수 있습니다. 웹사이트 [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) 또는 Cendres+Métaux SA의 치과용 문서를 참조하십시오(Cendres+Métaux SA의 모든 지사, 사무소 및 대리점에서 무료 제공).

## 20 보관 지침



제품 보관은 포장에 별도의 설명이 없는 경우 건조한 장소에 원래의 포장 그대로 보관해야 하며, 실온에서 직사광선을 피해 보관해야 합니다. 올바르게 보관할 경우 제품 특성에 영향을 미쳐 관리에 실패할 수 있습니다.

## 21 환자 정보

### 21.1 취급/후속 처치

전체 저작 시스템의 건강 유지 및 의치의 안전한 기능성을 보장하기 위해, 정기적인 후속 처치가 필요함을 늦어도 의치를 맞춰 넣은 날까지 환자에게 알려야 합니다. 손재주나 시력과 같은 환자의 능력에 맞도록 치아와 의치의 취급 및 관리 지침을 제공하고 동기를 부여하십시오.

고정식 및 탈착식 의치는 계속해서 변화하는 환경에서 구강 내 매우 큰 부담이므로 마모 징후가 나타나기 쉽습니다. 마모는 일상에서 언제든지 나타나며 피할 수는 없고 단지 줄일 수만 있습니다. 마모의 정도는 전체 시스템에 따라 다릅니다.

우리의 지향은 절대적인 최소값으로 마모를 줄일 수 있도록 가능한 한 서로 어울리는 최적의 재료를 사용하는 것입니다. 점막에 의치가 올바르게 위치하는지 적어도 일 년에 한 번은 점검해야 합니다. 경우에 따라 리라이닝하여 흔들림(과부담)을 예방할 수 있습니다. 처음에는 약 3개월 주기로 의치를 재점검하고 경우에 따라 유지 삽입물과 같은 보조 부품을 교체할 것을 권장합니다.

### 21.2 세척 및 관리

매번 식후 치아와 의치를 세척할 것을 권장합니다. 의치 세척 과정에는 연결 요소의 세척도 포함됩니다. 가장 좋은 세척 방법은 연결 요소를 흐르는 물로 부드러운 칫솔로 깨끗이 닦는 것입니다. 집중적인 세척 방법은 의치를 소형 초음파 기기에 넣고 적합한 세척 첨가제로 세척하는 것입니다. 고정밀 연결 요소는 절대 치약으로 세척하면 안 됩니다. 이로 인해 손상이 발생할 수 있습니다. 적합하지 않은 세제 또는 세척 정제 사용 시 주의가 요구됩니다. 이것 또한 고품질 연결 요소 또는 그 기능을 저해할 수 있습니다. 나머지 치아 또는 임플란트의 연결 부품은 물과 부드러운 칫솔 및 치간 칫솔로만 세척합니다. 치약을 사용하지 마십시오. 손상이 발생할 수 있습니다.

연조직의 염증을 방지하기 위해 앵커의 정기적 세척에 유의하십시오.

기구에 대한 안내 및 추가 관리 지침은 웹사이트를 참조하십시오([www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)).

안내와 추가 정보는 귀하의 Cendres+Métaux SA 대리점에 문의하십시오.

## 22 주문 정보

카탈로그 번호, 제품 개수 및 할당에 대한 자세한 정보는 항목 29 표 1의 제품 목록, 특수 제품 카탈로그, 포장에서 그리고 개별 제품의 경우 제품에서 바로 확인할 수 있습니다. 자세한 정보는 웹사이트 [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) 또는 Cendres+Métaux SA의 치과용 문서를 참조하십시오(Cendres+Métaux SA의 모든 지사, 사무소 및 대리점에서 무료 제공).

안내와 추가 정보는 귀하의 Cendres+Métaux SA 대리점에 문의하십시오.

## 23 가용성

이 문서에 설명 및 나열된 일부 제품은 모든 국가에서 구매할 수 있는 것은 아닙니다.

**24 로트 번호 역추적 가능성**

사용된 모든 부품의 로트 번호는 역추적의 보장을 위해 문서로 기록해야 합니다. 서로 다른 로트번호가 사용 설명서의 적용 범위에 설명되어 있는 의치 제조용 제품에 사용된 경우, 해당하는 모든 로트번호를 기록하여 역추적을 보장할 수 있도록 해야 합니다.

**25 이의 제기**

제품과 관련해 발생한 모든 사고는 Cendres+Métaux SA의 모든 지사, 사무소 및 대리점에서 Cendres+Métaux SA에게 알려야 하며 심각한 경우에는 사용자가 거주하는 곳의 담당 관청에 신고해야 합니다.

**26 안전한 폐기**

제품의 폐기는 지역의 현행 규정 및 환경 규정에 따라 실시해야 합니다. 이때 각각의 오염 정도를 고려해야 합니다. Cendres+Métaux LUX SA는 귀금속 폐기물 수집에 항상 열려 있습니다. 안내와 추가 정보는 귀하의 Cendres+Métaux SA 대리점에 문의하십시오.

**27 상표권**

Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, 스위스의 등록된 상표:

Soprano®

별도로 설명하지 않는 한, «®»로 표시된 모든 제품은 Cendres+Métaux Holding SA의 등록된 상표가 아니고 해당 제조사의 등록된 상표 표시입니다.

**28 면책**

이 작업 설명서를 유의하지 않아 발생하는 손해에 대해 제조사는 모든 책임을 거부합니다. 이 제품은 전체 콘셉트의 일부이며 해당 정품 구성요소 및 기구와 함께만 사용하거나 조합할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 제조사는 모든 책임을 거부합니다. 이의 제기가 있는 경우 로트 번호를 항상 함께 제시해야 합니다.

표 1에 명시된 제품과 관련하여 Cendres+Métaux SA가 판매하지 않는 타사 제품을 사용할 경우 Cendres+Métaux SA의 모든 보증이나 기타 명시적 또는 묵시적 의무가 무효화됩니다.

Cendres+Métaux SA 제품의 사용자는 제품이 특정 환자 및 특정 상황에 적합한지 아닌지 확인할 책임이 있습니다.

Cendres+Métaux SA는 Cendres+Métaux SA 제품 사용 또는 설치 시 전문적인 판단 또는 진료 오류와 관련하여 발생하는 직접적, 간접적, 형사적 등의 손해에 대해 모든 명시적 또는 묵시적 책임을 거부하고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

사용자에게는 표 1에 명시된 Cendres+Métaux SA 제품 및 그 적용에 대한 최신 진행 상황을 정기적으로 공부할 의무가 있습니다.

유의사항: 이 문서에 포함되어 있는 설명은 Cendres+Métaux SA의 제품에 즉시 적용하기에 충분하지 않습니다. 치의학, 치기공 분야의 전문 지식이 항상 필요하며, 적절한 경험이 있는 조작자가 표 1에 명시된 제품을 취급하는 것과 관련한 지침도 항상 필요합니다.

**29 제품 목록**

모든 Soprano® 제품에는 기본-UDI-DI: 764016651000038E8이 있고, 모든 Livento® 키트 및 Soprano® 키트에는 번호 764016651000039EA가 있습니다.

 개별 제품의 카탈로그 번호 및 UDI-DI 코드는 리필 품목과 일치합니다.

**제품 개요**

카탈로그 번호	제품 명칭	내용 키트	UDI-DI
<b>08058206</b>	<b>Soprano® Surface Kit</b>	<b>1</b>	<b>07640239930186</b>
08058207	Soprano® Surface Base 1	4g	07640239930193
08058208	Soprano® Surface Base 3	4g	07640239930209
08058209	Soprano® Surface Base 5	4g	07640239930216
08058210	Soprano® Surface Mamelon mango	4g	07640239930223
08058211	Soprano® Surface Mamelon cream	4g	07640239930230
08058212	Soprano® Surface Mamelon honey	4g	07640239930247
08058213	Soprano® Surface Mamelon salmon	4g	07640239930254
08058214	Soprano® Surface Fossa	4g	07640239930261
08058215	Soprano® Surface Cuspid	4g	07640239930278
08058216	Soprano® Surface Enamel Effect light-blue	4g	07640239930285
08058217	Soprano® Surface Enamel Effect pink	4g	07640239930292
08058218	Soprano® Surface Enamel Effect int.-orange	4g	07640239930308
08058219	Soprano® Surface Enamel Effect sun	4g	07640239930315
08058220	Soprano® Surface Enamel V1	4g	07640239930322
08058221	Soprano® Surface Enamel V2	4g	07640239930339
08058222	Soprano® Surface Enamel V3	4g	07640239930346
08058223	Soprano® Surface Opal	4g	07640239930353
08058224	Soprano® Surface Incisal	4g	07640239930360
08058225	Soprano® Surface Clear	4g	07640239930377
08058226	Soprano® Surface Fluid	25ml	07640239930384
<b>08058227</b>	<b>Soprano® Surface Gingiva Kit</b>	<b>1</b>	<b>07640239930391</b>
08058228	Soprano® Surface Gingiva light	4g	07640239930407
08058229	Soprano® Surface Gingiva violet	4g	07640239930414
08058230	Soprano® Surface Gingiva dark	4g	07640239930421
08058231	Soprano® Surface Gingiva orange	4g	07640239930438
08058232	Soprano® Surface Gingiva brown	4g	07640239930445
08058225	Soprano® Surface Clear	4g	07640239930377
08058226	Soprano® Surface Fluid	25ml	07640239930384
08058233	Soprano® Stain red	5g	07640239930452
08058234	Soprano® Stain dark-blue	5g	07640239930469

카탈로그 번호	제품 명칭	내용 키트	UDI-DI
08058235	Soprano® Stain red-brown	5g	07640239930476
08058236	Soprano® Stain orange	5g	07640239930483
08055184	Soprano® Glaze Paste	5g	07640173094173
08055283	Soprano® Glaze Fluid	25ml	07640173095729
<b>08058237</b>	<b>Soprano® Surface Bleaching Kit</b>	<b>1</b>	<b>07640239930490</b>
08058207	Soprano® Surface Base 1	4g	07640239930193
08058215	Soprano® Surface Cuspid	4g	07640239930278
08058216	Soprano® Surface Enamel Effect light-blue	4g	07640239930285
08058219	Soprano® Surface Enamel Effect sun	4g	07640239930315
08058220	Soprano® Surface Enamel V1	4g	07640239930322
08058222	Soprano® Surface Enamel V3	4g	07640239930346
08058223	Soprano® Surface Opal	4g	07640239930353
08058224	Soprano® Surface Incisal	4g	07640239930360
08058225	Soprano® Surface Clear	4g	07640239930377
08058226	Soprano® Surface Fluid	25ml	07640239930384
08058238	Soprano® Flu-Shade Bleach 1 - 2	5g	07640239930506
08058239	Soprano® Flu-Shade Bleach 3 - 4	5g	07640239930513
08058241	Soprano® Flu-Stain snow	5g	07640239930100
08058242	Soprano® Flu-Stain cotton	5g	07640239930117
08058243	Soprano® Flu-Stain cream	5g	07640239930124
08055252	Soprano® Flu-Stain navy-blue	5g	07640173095125
08055254	Soprano® Flu-Stain gray	5g	07640173095149
08055184	Soprano® Glaze Paste	5g	07640173094173
08055283	Soprano® Glaze Fluid	25ml	07640173095729
<b>08058240</b>	<b>Soprano® PASTE Stain&amp;Glaze Universal Kit</b>	<b>1</b>	<b>07640239930094</b>
08055181	Soprano® Flu-Shade A	5g	07640173094142
08055245	Soprano® Flu-Shade B	5g	07640173095057
08055246	Soprano® Flu-Shade C	5g	07640173095064
08055247	Soprano® Flu-Shade D	5g	07640173095071
08055248	Soprano® Flu-Stain white	5g	07640173095088
08058241	Soprano® Flu-Stain snow	5g	07640239930100
08058242	Soprano® Flu-Stain cotton	5g	07640239930117
08058243	Soprano® Flu-Stain cream	5g	07640239930124
08055249	Soprano® Flu-Stain yellow	5g	07640173095095
08058244	Soprano® Flu-Stain mango	5g	07640239930131
08055250	Soprano® Flu-Stain orange	5g	07640173095101
08055251	Soprano® Flu-Stain intense-orange	5g	07640173095118
08058245	Soprano® Flu-Stain champagne	5g	07640239930148
08058246	Soprano® Flu-Stain olive	5g	07640239930155
08055255	Soprano® Stain pink	5g	07640173095156
08058247	Soprano® Flu-Stain shadow	5g	07640239930162
08055252	Soprano® Flu-Stain navy-blue	5g	07640173095125
08055182	Soprano® Flu-Stain dark-blue	5g	07640173094159
08055183	Soprano® Flu-Stain brown	5g	07640173094166
08058248	Soprano® Flu-Stain red-brown	5g	07640239930179
08055254	Soprano® Flu-Stain gray	5g	07640173095149
08055253	Soprano® Flu-Stain black	5g	07640173095132
08055184	Soprano® Glaze Paste	5g	07640173094173
08055283	Soprano® Glaze Fluid	25ml	07640173095729



## 30 기호



전문가에게 중요한 정보



더 큰 주의를 알리는 경고 기호

## 포장에 있는 표시/기호



제조일자



제조사



카탈로그 번호



배치 코드



수량

[www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)

Rx only

제시된 주소에서 전자 형식으로 받을 수 있는 사용 설명서에 유의하십시오.

주의: 미국 연방법에 따라 이 제품은 의사 또는 의사의 지시에 의해서만 판매할 수 있습니다.



CE 표시가 있는 Cendres+Métaux 제품은 해당 유럽 요구사항을 충족합니다.



재사용 불가



비멸균



직사광선을 피해 보관



주의, 동봉된 문서 유의



제품 식별 번호



유럽 대리인



EU 내 수입업체



의료제품

